

Informations importantes

Ces masques sont réservés principalement à des personnes dans le cadre de leur activité professionnelle.

L'usage de ces masques est exclusivement réservé à des usages non sanitaires. Ils ne sont pas destinés à des patients symptomatiques présentant des troubles respiratoires.

Les masques ne pourront aucunement remplacer des EPI dont le port est rendu nécessaire au poste de travail.

Au titre de l'analyse des risques du poste de travail, l'utilisateur doit vérifier que la respirabilité effective est compatible avec les particularités du poste de travail et en particulier l'effort en application de l'article R.4323-91 du code du travail.

Ces masques sont utilisés dans le respect strict des recommandations en termes de gestes barrières, de distanciation sociale et dans le cadre de mesures de confinement prises dans le contexte de l'épidémie COVID 19.

Ces masques répondent aux performances de la catégorie 1 de la note interministérielle du 29 mars 2020, conformément à son annexe I :

- Efficacité de filtration des particules de 3 μm émises **>90%**,
- Perméabilité à l'air **>96 L.m⁻².s⁻¹** pour une dépression de 100 Pa.

Le produit utilisé pour ces masques a suivi un protocole d'essais de 20 lavages à l'Institut Français du Textile et de l'Habillement (i.e. : 20 cycles de lavages 60 °C, séchage Tambour 1 point, repassage 120 °C) suivant les préconisations de la norme AFNOR SPEC S76-001.10. À la suite de ce protocole de 20 lavages, la matière première présente des résultats la rendant compatible à un usage de masques UNS1 et UNS2.



Avertissement :

Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du règlement EU/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).

Notice d'utilisation correspondant à l'avis de l'ANSM du 24 mars 2020 portant sur la place de masques alternatifs en tissus dans le contexte de l'épidémie à COVID 19 et à la note d'information interministérielle du 29 mars 2020, mise à jour le 26 avril 2020, sur les nouvelles catégories de masques réservées à des usages non sanitaires.

BJ75
2 Rue de Hauterive
35600 Redon
FRANCE




MASQUES FILTRANT GRAND PUBLIC, EN KIT

Notice d'utilisation



Recommandations de manipulation des Masques

- Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
- Inspecter le masque et s'assurer qu'il n'y a pas de trous, déchirures, ou dégradations.
- Ne jamais modifier le masque de quelque façon que ce soit.
- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche.
- Attacher le masque derrière la tête à l'aide des lanières, sans croiser celles-ci. Pour une meilleure efficacité du masque, faire passer l'attache supérieure au plus bas et au ras des oreilles.
- Descendre le bas du masque sous le menton.
- Veiller à ajuster au mieux le masque sur le visage, au niveau du nez et du menton.
- Vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte.
- Lorsque l'on porte un masque :
 - Eviter de le toucher.
 - Ne pas le déplacer, ne jamais le mettre en position d'attente sur le front ou sur le menton.
- Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.
- Si besoin de boire ou de manger, changer de masque.
- Lorsqu'il s'humidifie, remplacer le masque par un autre non pollué.
- Pour retirer le masque :
 - L'enlever par l'arrière à l'aide des lanières (ne pas toucher le devant du masque).
 - Soit, recycler le masque par lavage (cycle de lavage 60 °C, séchage Tambour 1 point, repassage 120 °C), soit le jeter dans une poubelle fermée.
 - Se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

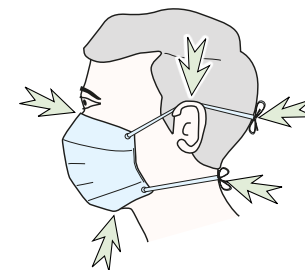

Important :

- N'utiliser ces masques que s'ils sont neufs ou lavés moins de 20 fois.
- Le temps de port du masque est limité à 4 heures et doit être jeté ou lavé impérativement après ce délai.

Instructions de préparation du Masque Filtrant Grand Public




Important :

Désinfecter préalablement le **plan de travail** et se laver **les mains** à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, avant montage du masque.




Etape 1, prise en main du carton de kits

- Poser le carton contenant les kits de masques debout, bec de sortie en haut.
- Retirer la bande adhésive (1) qui maintient en place le kit d'amorce.
- Tirer sur le masque d'amorce jusqu'à faire apparaître le masque suivant. Procéder de même avec les lanières.
- Il est impératif de jeter ce kit d'amorce.

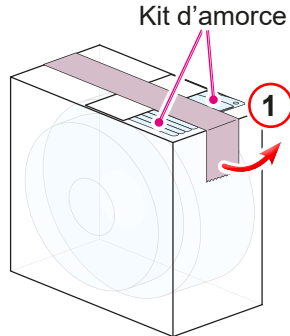


Etape 2, corps du masque

- Dérouler la bobine de masques (1) sur une longueur.
- Détacher 1 masque suivant les pointillés (2).

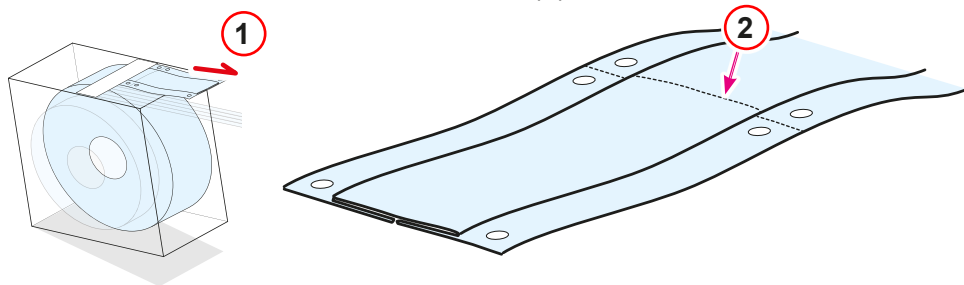


Nota : Il peut arriver qu'un masque avec un raccord apparaisse dans une des bobines en votre possession :
Merci de le jeter sans l'utiliser.

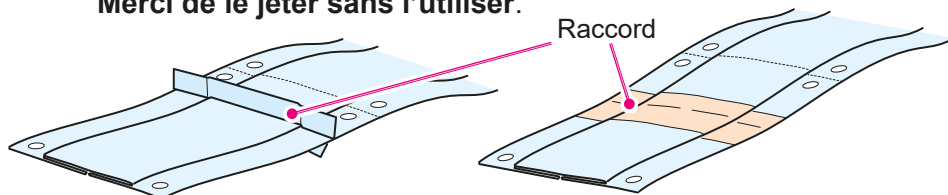

Etape 3, lanières du masque

- Dérouler la bobine de lanières (1) sur une longueur.
- Détacher un lot de 4 lanières (2).
- Séparer les 4 lanières suivant les pointillés (3).

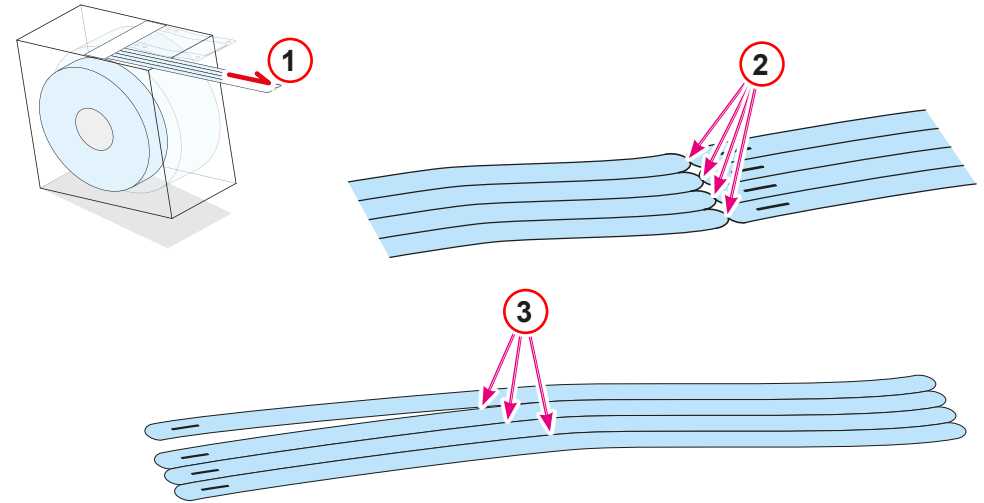

Etape 4, montage du masque

- Passer l'extrémité perforée d'une lanière dans un des trous du masque, depuis la face extérieure vers la face intérieure (1).
- Passer l'autre extrémité dans la perforation de la lanière (2), puis serrer.
- Répéter l'opération pour les 3 autres trous du masque.

